



## 常见问题解答 (FAQs)

---

### 【一般性问题】

#### Q1. Rosi是什么？

Rosi是一款可以有效缓解痛经的痛经仪，采用对身体没有伤害的TENS技术，一种非药物无创止痛法，以此缓解痛经和不适。

#### Q2. Rosi的工作原理是什么？

Rosi采用经皮的神经电刺激疗法 Transcutaneous electrical nerve stimulation（简称TENS），主要是经皮肤输出温和微量的电流刺激知觉神经去阻断痛觉神经信号的传递，并触发人体内部的天然止痛药内啡肽的释放，有效缓解痛经。

#### Q3. Rosi使用安全吗？

安全的，Rosi已获得日本PMDA和FDA的监管批准、并符合欧盟MDR标准。并已经过全面测试，符合最高的安全质量标准。

#### Q4. 谁可以使用Rosi？

Rosi专为有痛经困扰的女性设计。它适合大多数女性，但如果您有任何医疗状况或者您怀孕，请在使用的Rosi前咨询您的医疗保健专业人员。

#### Q5. 有副作用吗？

目前没有关于副作用的报告。

#### Q6. 使用时有什么限制吗？

如果您使用心脏起搏器，其避免使用本产品。另外，避免在开放性伤口、癌性病变或感染或发炎的皮肤上使用电极片。



## 【产品用途】

### Q1. 如何设置我的Rosi痛经仪？

首先使用附带的Type-C充电线给仪器充满电。将电极片和主机链接，然后将电极片贴在小腹或感到疼痛的部位，打开仪器并根据您的需要调整强度。

### Q2. Rosi应该使用多长时间？

您可以根据需要每天多次使用Rosi,每次30-60分钟。请始终遵循用户手册的安全指南。

### Q3. 如何清洁和保养Rosi？

每次使用后用湿布清洁电极垫，将主机和电极垫存放在附送的便携收纳袋，以确保其安全和清洁。

### Q4. 可以在移动的时候使用Rosi吗？

可以。Rosi设计小巧便捷，出行中也可以使用。因为是无线设计，所以您可以在使用时自由移动。



## 【常见故障】

### Q1. 如果Rosi无法开机该怎么办？

确保主机充满电。如果仍然不能开机，试着按住开关键10秒重启。如果仍未解决，请联系我们的客服。

### Q2. 如果电极片粘不牢怎么办？

确保电极片和皮肤清洁干燥。如果电极片随着时间的推移失去粘性，可以在我们的网站上购买替换电极片。

### Q3. 为什么我用了没感觉疼痛缓解？

请检查电极片是否贴好位置，同时适当增加强度，可以感受到微量的电流。如果您仍然感觉不到缓解，请查阅用户手册或联系客服以获得进一步帮助。

### 联系我们

日本东京都千代田区丸之内  
3-4-1，新国际大厦4楼 邮编100-0005

Rosicare

Email: [contact@rosicare.com](mailto:contact@rosicare.com)

☎ 03-6269-9120